



Interprétation des résultats


POSITIF

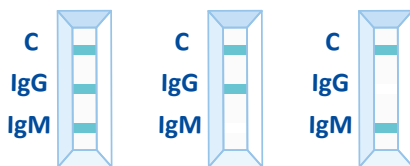

NÉGATIF

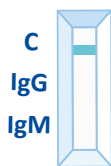

NON VALIDE

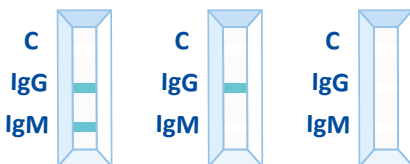

***NOTE:** L'intensité de la couleur au niveau des régions de la ou les lignes de test IgG et/ou IgM varie en fonction de la concentration d'anticorps anti-SRAS-COV-2 dans l'échantillon. Par conséquent, toute nuance de couleur au niveau de la ou les lignes de test IgG et/ou IgM doit être considérée comme positive.

IVD Dispositif médical de diagnostic in Vitro à usage professionnel uniquement

U Usage unique

T Température de conservation entre 2-30°C

I Lire attentivement la notice

F Fabricant

DDF Date fabrication

DDP Date de péremption

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER A DOMICILE

VITAL CARE Kit de test rapide COVID-19 (IgG/IgM) EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT PAR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE. NE PAS SÉPARER LES COMPOSANTS DU TEST.

UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE PEUT ENGENDRER DES RÉSULTATS INVALIDES OU ERRONÉS.




NE PAS UTILISER SI LA POCHETTE EN ALUMINIUM EST ENDOMMAGÉE.

UTILISER LE TEST IMMÉDIATEMENT APRÈS OUVERTURE DE LA POCHETTE EN ALUMINIUM.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE.

Vital Care
Production Distribution et Logistique

Vous pouvez visionner notre vidéo explicative en scannant ce code, ou en vous rendant sur notre chaîne YouTube

Tapez **Vital Care** et retrouvez nous sur :   

www.vitalcare.dz



Siège administratif : Semmar Djenane Boudjakdji, lieu-dit Citizen, îlot 272, section 01, Birkhadem, Alger, Algérie.



Tél. : +213 (0) 770 84 1000 / 770 84 2000 / 770 84 3000 - FAX : +213 21 44 70 96

E-mail : accueil@vitalcareprod.com

Réactovigilance : vigil@vitalcareprod.com

www.vitalcare.dz

VITAL CARE® KIT DE TEST RAPIDE COVID-19 (IgG/IgM)

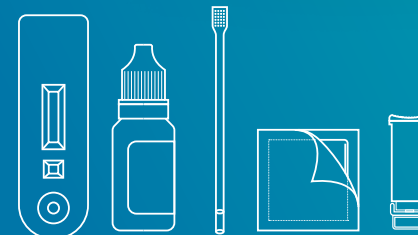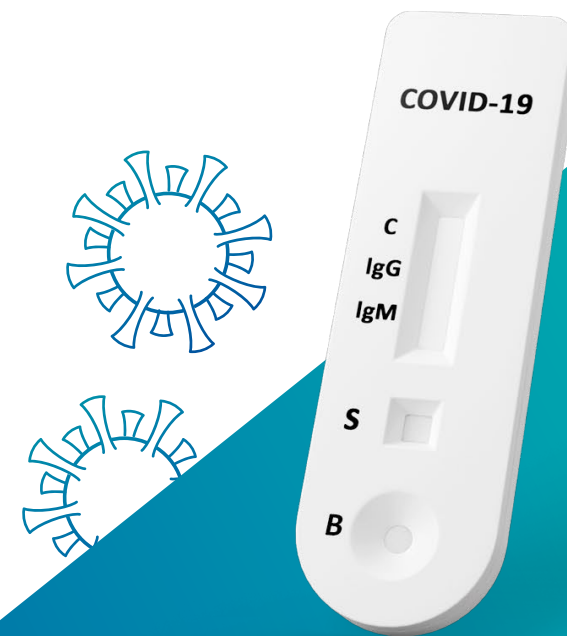

25 Tests

IVD Dispositif médical de diagnostic in vitro à usage professionnel uniquement

À L'USAGE DES
PROFESSIONNELS
UNIQUEMENT




À L'USAGE DES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT

VITAL CARE® KIT DE TEST RAPIDE COVID-19 (IgG/IgM)

Le kit de test rapide COVID-19 (IgG/IgM) est un test de diagnostic in Vitro rapide pour la détection qualitative des anticorps IgG et IgM contre le SRAS-Cov-2 dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.

Chaque Kit contient :

- Cassette de test : **25 unités**
- Solution Tampon: **5 ml**
- Pipette : **25 unités**
- Lancette : **30 unités**
- Lingette nettoyante antiseptique : **25 unités**
- Notice d'utilisation.

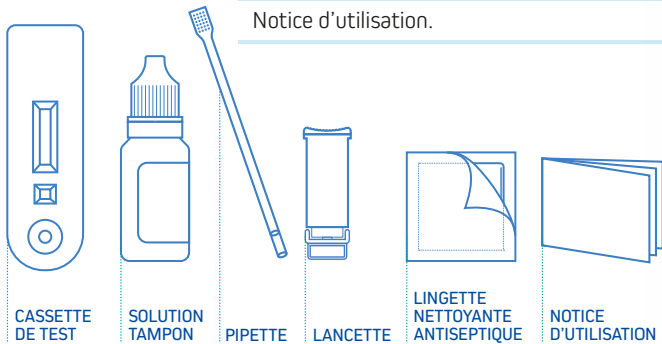

Fonctionnalités avancées

IgG Précision **98,9%*** **IgM** Précision **96,1%****

*Intervalle de confiance 96,2%~99,9%
**Intervalle de confiance 92,2%~98,4%



Rapide
(10 min).



Conservation à température ambiante
(2-30°C).



Utilisation facile.



Qualitatif.



Petit échantillon
(10µL).



Précis.

Avant utilisation



1.

Le transport des tests, échantillons, solution tampon se fait à température ambiante (18-25°C).




2.

Portez des vêtements de protection et des gants jetables. Se laver les mains avant et après chaque utilisation.



3.

Sortez la cassette de test de la pochette scellée.

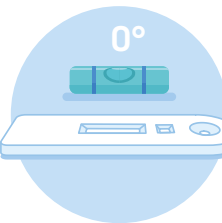

4.


Placez la cassette de test sur une surface propre et de niveau.

Étapes pour un test




1.

Nettoyez la main de patient avec a lingette nettoyante antiseptique et laisser sécher.

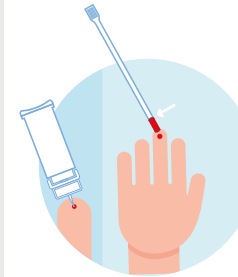

2.

Piquez la peau avec une lancette stérile à usage unique et aspirer **10µL** de sang total jusqu'à la ligne de remplissage visible sur la pipette.

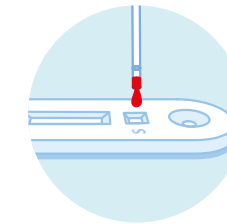


3.

Tenir la la pipette à usage unique verticalement et transférer une goutte de sang total dans le puit « **S** ».



4.

Ajouter 2 gouttes de solution tampon dans le puit « **B** ».

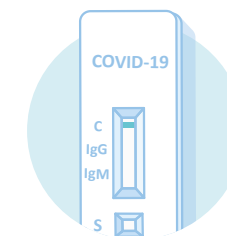

5.

Lire le résultat après **10 minutes**. **Ne pas interpréter les résultats au-delà de 20 minutes.**